

Bańki Do Masażu Próżniowego Twarzy i Ciała

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem produktu, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla użytkownika.

1. Czym są bańki Do Masażu Próżniowego Twarzy i Ciała i w jakim celu się je stosuje

Bańki do Masażu Próżniowego to produkt wykonany z ręcznie formowanego szkła. W miejscu styku ze skórą zaopatrzone są w szeroki kołnierz poprawiający komfort ich aplikacji i stosowania. Integralną częścią Bańki - do Masażu Próżniowego Twarzy jest silikonowa gruszka wykonana z miękkiego silikonu. Jej zadaniem jest wytworzenie odpowiedniego podciśnienia regulowanego poprzez zmianę siły wywieranego na nią nacisku.

Masaż Bańką - polega na próżniowym zasysaniu do wnętrza bańki fałdów skóry wraz z warstwą tkanek podskórnych a następnie na wykonywaniu bańką ruchów po powierzchni skóry w rejonie objętym masażem. Zabieg poprawia ukrwienie, wspomaga krążenie limfy, płynu śródmiąższowego jak również ujędrnia i uelastycznia skórę oraz wpływa na poprawę funkcji skurczowych mięśni podnosząc ich napięcie i elastyczność.

2. Bańki Do Masażu Próżniowego Twarzy - Skład i zawartość opakowania

W skład zestawu znajdującego się w opakowaniu wchodzi 4 Bańki do Masażu Próżniowego Twarzy

Zestaw zawiera bańki o wymiarach:

- Bańka o średnicy 35 mm i wysokości 90 mm
- Bańka o średnicy 55 mm i wysokości 90 mm

Materiał: Szkło + silikon

3. Jak stosować Bańki Do Masażu Próżniowego Twarzy

Bańki Do Masażu Próżniowego Ciała można stosować na niepodrażnioną i odpowiednio przygotowaną skórę. Przed użyciem bańki, na powierzchnię skóry należy nanieść odpowiednią ilość olejku bądź balsamu. Podczas aplikacji siłę

próżni należy regulować poprzez zmianę siły nacisku na gumową gruszkę, każdorazowo uwzględniając stopień wrażliwości skóry pacjenta, jego wiek oraz stan fizyczny. Celem uniknięcia kontuzji oraz zapewnienia optymalnego komfortu podczas zabiegu należy właściwie dobierać siłę wytworzonego podciśnienia i rozmiar baniek do wielkości masowanej części ciała zgodnie z rekomendacją. Liczba powtórzeń na każdej z linii widocznych na schemacie masażu twarzy bańką próżniową nie powinna przekraczać 2-3.

Bańka o średnicy zewnętrznej 25 mm:

- zalecana do masażu wyrównującego linie nosa oraz fałdy nosowo-wargowe (poziom podciśnienia średni/wysoki), masażu czoła i brwi (poziom podciśnienia - średni/wysoki) oraz masażu wokół ust (poziom podciśnienia - średni/wysoki)

Bańka o średnicy zewnętrznej 35 mm


- zalecana do masażu szyi (poziom podciśnienia - niski), masażu owalu twarzy (poziom podciśnienia - średni/wysoki) oraz masażu czoła i brwi (poziom podciśnienia - średni/wysoki), a także masażu ramion

Częstotliwość oraz czas trwania zabiegów należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta po konsultacji ze specjalistą.

5. Bańki Do Masażu Próżniowego Twarzy i Ciała - Sposób użycia

- powierzchnię skóry w miejscu aplikacji przemyj ciepłą wodą a następnie osusz
- zajmij pozycję leżącą lub siedzącą, zadbaj o swój komfort,
- rozgrzej dłonie, nałóż na nie olejek bądź balsam do masażu a następnie nanieś go na skórę w obszarze poddawany masażowi, ułatwi to

Bańki Do Masażu Próżniowego Twarzy i Ciała

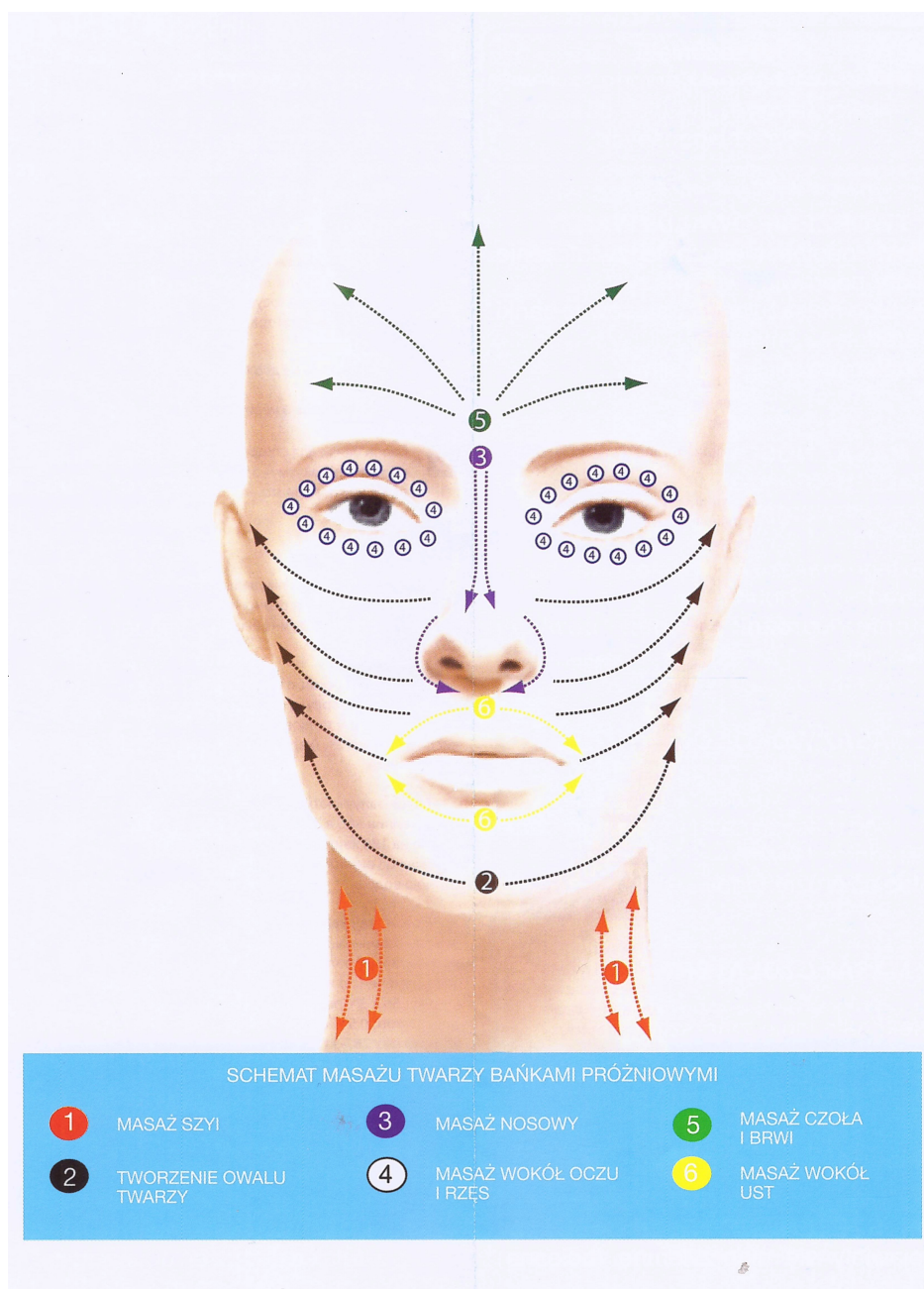

przedstawionymi na schemacie masażu twarzy,

- W celu zmniejszenia siły podciśnienia bądź całkowitego usunięcia bańki ze skóry w miejscu styku jej szklanego kołnierza ze skórą należy przyłożyć palec a następnie wcisnąć go do wnętrza bańki.

6. Bańki Do Masażu Próżniowego Twarzy

przesuwanie bańki po skórze oraz uchroni przed urazami,

- Zgodnie z rekomendacją do masowanego obszaru dobierz odpowiedni rodzaj bańki,
- Podczas aplikacji bańki jej szklaną część przyłóż do skóry, jednocześnie regulując moc wytwarzanego podciśnienia poprzez zmianę siły nacisku wywieranego na silikonową gruszkę
- Trzymając bańkę za jej szklaną część wykonuj płynne ruchy zgodnie z liniami

Przeciwwskazania

i środki ostrożności

Baniek do Masażu Próżniowego Twarzy nie należy stosować na podrażnioną, uszkodzoną bądź naczynkową skórę w tym posiadającą siniaki i obrzęki. Baniek próżniowych nie należy stosować u osób cierpiących na padaczkę, zespół odstawienia alkoholu bądź narkotyków, stwardnienie rozsiane w okresie nowego rzutu choroby, hemofilię. Nie zaleca się stosowania masażu bańkami u kobiet w ciąży, podczas menstruacji, u dzieci w wieku do 12 roku życia oraz osób w podeszłym wieku które przekroczyły 80 rok życia. Przeciwwskazaniem do

Bańki Do Masażu Próżniowego Twarzy i Ciała

stosowania baniek jest gorączka, choroba nowotworowa, choroby zakaźne, niewydolność krążeniowa np. w postaci żylaków czy zapalenia żył, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, rozrusznik serca.

7. Bańki Do Masażu Próżniowego Twarzy i Ciała – Uwagi

Bańki do Masażu Próżniowego Twarzy to produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Bańki są produktem wielokrotnego użytku a ich nieprawidłowe stosowanie może mieć negatywne skutki dla zdrowia oraz wywołać niepożądane skutki uboczne. Bańki należy przechowywać w chłodnym, suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu, w temperaturze pokojowej unikając bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne.

Zabrania się nakładania baniek próżniowych na kręgosłup, serce, nerki, biust, z przodu szyi, w okolicy tarczycy, wzdłuż dużych naczyń krwionośnych oraz na obszary ciała na których występują żylaki.

Pojawienie się niewielkiego zaczerwienienia skóry w obszarze poddanym masażowi bańką próżniową jest zjawiskiem naturalnym. U osób o skórze wrażliwej i delikatnej przed masażem bańką zaleca się przygotowanie okolicy ciała poprzez wykonanie kilkuminutowego masażu ręcznego.

Masaż bańką należy wykonywać szybkimi ruchami. Kontakt bańki ze skórą w jednym miejscu nie powinien przekraczać 2 sekund. W celu uniknięcia uszkodzeń i obrzęków skóry bezwarunkowo przed rozpoczęciem masażu należy zaaplikować na nią dedykowany do tego celu olejek bądź balsam.

Bańki należy używać zgodnie z rekomendacją odpowiednio dobierając ich wielkość oraz siłę wytwarzanego podciśnienia przy uwzględnieniu miejsca ich stosowania, wrażliwości skóry, jej stanu oraz wieku osoby.

Usuwanie baniek ze skóry w sposób niezgodny z zaleceniami może prowadzić do jej uszkodzeń oraz powstania obrzęków.

Bańki próżniowe o średnicy 55 mm mogą być wykorzystywane do masażu antycellulitowego.

8. Możliwe działania niepożądane

Używanie Baniek Do Masażu Próżniowego Twarzy niezgodnie z zaleceniami może prowadzić do wystąpienia efektów ubocznych w postaci uszkodzeń skóry, dużych siniaków, rozległych krwawych podbiegnięć czy stanów zapalnych.

W przypadku wrażenia zbyt silnego przylegania bańki do skóry, bądź wywołującego występujące podczas masażu dolegliwości bólowe czy zmiany skórne w postaci silnych zaczerwienień, krwawych podbiegnięć należy zmniejszyć siłę podciśnienia, skorygować wielkość używanej bańki. W przypadku braku

poprawy zaprzestać jej stosowania i skonsultować się ze specjalistą.

Bańki Do Masażu Próżniowego Twarzy i Ciała